

# Cicatridina®

## spray

Dr. Gorkič

**FD**  
FARMA - DERMA

**SESTAVA:** aluminijev oktenilsukcinat škroba, heksametildisiloksan, mandljevo olje, vitamin E acetat, ksimerinska kislina, eterično olje limone, eterično olje kajeputa, natrijeva sol hialuronske kisline, butan, izobutan, propan.

**UPORABA:** dodatna pomoč pri celjenju površinskih in globokih ran (odrgnine, raztrganine, opekline, kirurške rane, preležanine in razjede).

**NAVODILO ZA UPORABO:** Pred vsako uporabo poškodovani predel skrbno očistite. ● Za boljše mešanje prahu pred vsako uporabo vsebnik dobro pretresite, dokler ne zaslišite zvoka kroglic v notranjosti. Med pršenjem držite pršilo navpično 10 do 15 cm od poškodbe. Pršite izključno na poškodovani predel. Postopek ponovite 2 - do 3 - krat na dan.

**PREVIDNOST OB UPORABI:** Uporaba kateregakoli izdelka, posebno dolgotrajna, lahko pri površinski uporabi poveča preobčutljivost. V takem primeru uporabo prekinite in se posvetujte z zdravnikom o nadaljnji terapiji.

**KONTRAINDIKACIJE:** Če ste preobčutljivi za sestavine.

**F +**



**ZELO LANKO  
VNETLJIVO**

Rok uporabnosti se nanaša na nepoškodovan in pravilno hranjen izdelek. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe, ki je naveden na embalaži.

**MEDICINSKI PRIPOMOČEK**

Proizvajalec: FARMA-DERMA s.r.l. Via dei Bersaglieri, 10 - 40010 Sala Bolognese (BO), Italija (Italy)  
Uvoznik: DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec, Slovenija

**LOT :** **EXP :** ↓



SLO 23 REV 02

**CE 125 ml e**  
**0373 1753**



8